

## PRUEBA DE EMBARAZO

### ANTES DE COMENZAR

1. La prueba sin abrir puede guardarse a temperatura ambiente (hasta 30 °C/ 86 °F). No congelar.
2. No abra la envoltura de aluminio hasta que haya recolectado la muestra y esté lista para realizar la prueba.
3. No use la prueba si la envoltura de aluminio está rota o no está sellada.
4. No use esta prueba después de la fecha de vencimiento.

### CONTENIDO DEL KIT DE PRUEBA

Este kit de prueba contiene varias envolturas. Cada envoltura contiene una prueba y un disecante. *Nota: El disecante es para fines de conservación solamente, y no debe usarse en el procedimiento de prueba.*

### QUÉ MÁS NECESITA

1. Un cronómetro (reloj pulsera o reloj de pared).
2. Un recipiente limpio y seco para la recolección de la muestra de orina.

## RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

CUÁNDO RECOLECTAR LA ORINA PARA LA PRUEBA:

- Si realiza la prueba a partir del día en el que debería comenzar su período, puede realizarla en cualquier momento del día.
- Si realiza pruebas anticipadas, use la primera orina del día.

CÓMO RECOLECTAR LA ORINA:

- Puede recolectar la muestra de orina en un recipiente limpio y seco o en uno de vidrio.
- La orina recién recolectada no requiere ningún tratamiento previo especial.

*Nota: No mezcle muestras de orina recolectadas en diferentes momentos del día.*

## CÓMO UTILIZAR LA PRUEBA

Si la prueba y la muestra de orina se guardan refrigeradas, deje que lleguen a temperatura ambiente (20 minutos aproximadamente).


1. Retire la prueba de la envoltura sellada y úsela tan pronto como sea posible. *Nota: No toque ninguna parte de la prueba que no sea la empuñadura de color.*
2. Con las flechas apuntando hacia la muestra de orina, coloque la prueba en sentido vertical dentro de la orina durante, al menos, 10 a 15 segundos.
3. Retire la prueba de la muestra de orina y **coloque la prueba en una superficie plana**, limpia, seca y no absorbente.
4. Inicie el cronómetro.
5. Puede leer el resultado hasta cinco (5) minutos después de colocar la muestra, pero no debe leer el resultado después de quince (15) minutos. (Consulte la pregunta 9).



## CÓMO LEER EL RESULTADO

Preste atención a la posición de la línea de control (C) y la línea de prueba (T).

1. **Resultado positivo:** Aparecen dos líneas de color, una en el lugar de la línea de prueba (T) y la otra en el lugar de la línea de control (C). (Consulte las preguntas 3 y 4)
2. **Resultado negativo:** Solo aparece una línea de color en la posición de la línea de control (C). No aparece ninguna línea de color en la posición de la línea de prueba (T). (Consulte las preguntas 5 y 6)
3. **Resultado inválido:** La ausencia de una línea de color en la posición de la línea de control (C) es un resultado inválido. Debe repetir la prueba con una nueva. (Consulte las preguntas 8 y 9)

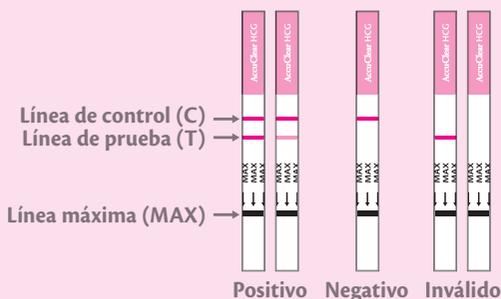

## PRUEBA DE EMBARAZO

### PREGUNTAS Y RESPUESTAS

#### 1. ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Accu-Clear®?

Cuando está embarazada, su organismo produce una hormona del embarazo llamada hCG (gonadotropina coriónica humana). Esta hormona aparece en la orina poco después de que se produce la fertilización. La prueba puede detectar cantidades diminutas de esta hormona en la orina.

#### 2. ¿Cuándo puedo realizar la prueba con la prueba de embarazo Accu-Clear®?

La prueba de embarazo Accu-Clear® está diseñada para detectar la hCG hasta cinco (5) días antes del día en el que espera el comienzo del período, es decir, hasta seis (6) días antes del retraso del período. La cantidad de esta hormona aumenta rápidamente con el progreso del embarazo. Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debe tener el período y obtiene un resultado de "No Embarazada", aún existe la probabilidad de que esté embarazada. Mire el siguiente cuadro para conocer los resultados de pruebas clínicas de la prueba de embarazo Accu-Clear®:

Cantidad de días antes del día en el que espera el comienzo del período	-1 día	-2 días	-3 días	-4 días	-5 días
% de muestras de mujeres embarazadas con resultado de "Embarazada"	>99%	99%	99%	96%	78%

Para calcular la fecha esperada del período, calcule la duración habitual del ciclo contando la cantidad de días desde el primer día del período hasta el día anterior al comienzo del siguiente período. El día en el que espera el comienzo del período se basa en la cantidad promedio de días del ciclo menstrual para los 3 ciclos anteriores.

#### 3. Si el resultado es positivo (DOS LÍNEAS), ¿qué debo hacer?

Significa que su orina contiene hCG y que probablemente esté embarazada. Debe consultar a su médico para confirmar que esté embarazada y para analizar los próximos pasos que debe seguir. Cuanto antes vea al médico, mejor será para su salud. Si la línea de prueba (T) es muy clara y no está segura, puede volver a realizar una prueba, al menos, 48 horas después de la prueba inicial. La línea de prueba se oscurecerá a medida que el organismo produzca una mayor concentración de la hormona hCG después de la implantación.

#### 4. Si aparecen dos líneas claras y bien diferenciadas, pero una línea es más oscura que la otra, ¿estoy embarazada?

Sí. Esto debe interpretarse como un resultado positivo.

#### 5. Si el resultado es negativo, ¿qué debo hacer?

Significa que no se ha detectado hCG en la orina. Es probable que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto como para detectarse o que haya calculado mal el día del comienzo de su período. Si se obtiene un resultado negativo y aún sospecha que está embarazada, debe repetir la prueba con una nueva muestra de orina recién recolectada algunos días más tarde. Si la segunda prueba es negativa, y aún no ha menstruado, debe consultar a su médico para recibir más asesoramiento.

#### 6. Veo una línea muy clara, o lo que parece ser una línea, en el área de prueba. ¿Es un resultado positivo?

Las manchas, las sombras o las marcas de evaporación no son un resultado positivo. Si está embarazada, la línea de prueba será evidente y bien diferenciada. Si la línea es muy clara y no está segura, puede volver a realizar una prueba en 48 horas. La línea de prueba se oscurecerá a medida que el organismo produzca una mayor concentración de la hormona hCG con el progreso del embarazo.

#### 7. ¿Puedo obtener un resultado negativo o engañoso?

Los resultados negativos son posibles en mujeres sanas no embarazadas. Si obtiene un resultado inesperado, debe consultar a su médico.

- Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG pueden generar resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad suelen administrarse de manera inyectable, y es posible que las pruebas realizadas poco tiempo después de la administración den un resultado de Embarazada engañoso).
- La prueba no debería verse afectada por otras terapias de fertilidad (como citrato de clomifeno), analgésicos, antibióticos o anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva).
- Si dejó de tomar anticonceptivos hormonales recientemente o está utilizando terapias de fertilidad, como citrato de clomifeno, sus períodos pueden ser irregulares, lo que provocará que realice la prueba con demasiada anticipación.
- Si recientemente estuvo embarazada (por ejemplo, si dio a luz, perdió un embarazo o tuvo un aborto), puede obtener un resultado de Embarazada engañoso.

#### 8. ¿Cómo sé que me realicé la prueba correctamente?

El aspecto de la línea de color en la posición de la línea de control (C) le indica que siguió el procedimiento de prueba correctamente y que se absorbió la cantidad de orina adecuada.

#### 9. ¿El resultado puede cambiar después de un período determinado?

La prueba debe leerse en cualquier momento entre los 5 y 15 minutos. Después de transcurridos 15 minutos, cualquier cambio que se produzca en el resultado no se debe tener en cuenta. Pueden observarse resultados positivos de color fuerte a partir de 10 a 30 segundos, mientras que los resultados positivos débiles pueden demorar hasta 5 minutos en aparecer. Para confirmar resultados negativos, se requiere esperar el tiempo total de reacción de 5 minutos.

#### 10. ¿El alcohol afecta la prueba?

El alcohol no debería afectar la prueba. Sin embargo, no se recomienda usar la prueba después de beber grandes cantidades de líquidos de ningún tipo.

#### 11. ¿Qué precisión tiene la prueba de embarazo Accu-Clear®?

Las evaluaciones clínicas han demostrado que el dispositivo de prueba tiene una precisión superior al 99% a partir del día en el que se espera el comienzo del período<sup>1</sup>. La cantidad de hCG varía considerablemente según las semanas de embarazo y los individuos.

#### PRECAUCIONES

- Solo para uso de diagnóstico *in vitro* (no destinado a uso interno).
- Esta prueba está diseñada para ser utilizada una sola vez. NO REUTILIZAR.
- Desear con los residuos domésticos habituales.
- La prueba debe guardarse a una temperatura de entre 36 °F y 86 °F (2 °C y 30 °C).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Esta prueba es para uso doméstico.

#### LIMITACIONES

Al igual que sucede con todas las pruebas de diagnóstico, solo un médico puede confirmar un diagnóstico de embarazo después de haber evaluado todos los resultados clínicos de laboratorio.

<sup>1</sup>Precisión del 99% en la detección de los niveles típicos de la hormona del embarazo. Tenga en cuenta que los niveles de hormonas varían. No obstante, algunas mujeres embarazadas pueden no tener cantidades detectables de la hormona del embarazo en la orina el primer día de retraso del período o es posible que no hayan calculado bien el primer día de su período.

Distribuido por Procter & Gamble, Cincinnati, OH 45202.

Accu-Clear® es una marca comercial registrada de US CD LLC. Hecho en R.P.C.

© 2020 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Todos los derechos reservados.

P/N 601009-10 03-2020